

Электрическая дезинфицирующая сушильная камера «Karak Dry Box» DB-UVC28



ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Вставьте штекер блока питания 12В (идёт в комплекте) в разъём на задней стороне устройства, вставьте вилку блока питания в розетку 220вольт. Электрическая дезинфицирующая сушильная камера «Karak Dry Box» готова к использованию.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

- Откройте крышку электрической дезинфицирующей сушильной камеры «Karak Dry Box»
- Поместите очищенные от загрязнений слуховые аппараты в сушильную камеру предварительно вынув элемент питания и по возможности оставив батарейный отсек открытым.
- Закройте крышку электрической дезинфицирующей сушильной камеры «Karak Dry Box» и нажмите на кнопку включения. В то время, как вы услышите звуковой сигнал с вибрацией, зажгутся 5 светодиодных индикаторов на панели сушильной камеры.
- Электрическая дезинфицирующая сушильная камера «Karak Dry Box» включена. Программа комфортной сушки (УФ излучение 8 минут + сушка 3 часа) запускается автоматически.
- Ультрафиолетовое излучение (253.7 нм) устраняет микробы и бактерии на 99,9% в течение 8 минут

- Примерно через 8 минут УФ- излучение будет завершено автоматически, а 3-часовая программа сушки с температурным режимом около 50 С° будет продолжаться и 5 светодиодных индикаторов будут выключаться по одному каждые 36 минут.
 - По прошествии примерно 3-х часов все светодиодные индикаторы выключатся, и сушильная камера отключится автоматически.
 - Чтобы отключить сушильную камеру во время работы, нужно нажать кнопку и удерживать ее нажатой в течение 3-х секунд. Длинный звуковой сигнал с вибрацией указывает на то, что сушильная камера отключена.
- Теперь ваши слуховые аппараты сухие и продезинфицированные.
Прежде, чем использовать слуховые аппараты, убедитесь, что они остыли до температуры тела.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Сушильная камера может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше и людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также людьми, не имеющими достаточного опыта использования подобных устройств, только в присутствии ответственного лица или при наличии четких указаний относительно использования камеры. Детям запрещено играть с сушильной камерой. Не оставляйте детей без присмотра рядом с работающей камерой.
- Если приобретенная сушильная камера имеет повреждения, она должна быть заменена изготовителем или дилером во избежание опасности.
- Сушильная камера «Karak Dry Box» предназначена только для домашнего и личного использования. Не допускайте попадания на сушильную камеру воды. Запрещается использовать сушильную камеру рядом с ванной.
- Если у сушильной камеры возникают какие-либо неисправности, отключите ее от электропитания и немедленно передайте дилеру.
- Пожалуйста, не разбирайте сушильную камеру и используйте только поставляемый адаптер питания.
- Сушильная камера содержит излучатель УФ-С. Не смотрите непосредственно на источник УФ-излучения, так как это может привести к повреждению глаз или кожи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:

Прибор: Электрическая дезинфицирующая сушильная камера Капак

Модель: DB-UVC28

Номинальное напряжение: 5 В

Тепловая мощность: 2.5Вт, УФ-С 2.0 Вт

Установка таймера: УФ-С около 8 минут, сушка около 172 минут

Габариты устройства: 130 x 85 x 38 мм

ЭКОЛОГИЧНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Вы можете помочь защитить окружающую среду!

Пожалуйста, не забудьте соблюсти требование: сдать неработающее электрооборудование в соответствующий центр по утилизации. Упаковочный материал пригоден для переработки. Утилизируйте упаковку экологически чистым способом и предоставьте ее для повторного использования.